

# MODE D'EMPLOI

## Masque en tissu lavable

*Ce masque en tissu lavable et réutilisable, vous est distribué gratuitement par la commune de Pont-l'Abbé. La commande a été mutualisée par la Communauté de communes du Pays Bigouden Sud. L'utilisation massive de ce type de masque par la population permet de lutter contre la propagation du virus Covid-19. Ce masque doit être porté en complément des gestes barrières et des mesures de distanciation physique.*

Ce masque a été fabriqué en respectant toutes les préconisations sanitaires. Il est recommandé de le laver avant la première utilisation.



Le temps de port de masque est **limité à 4 heures**.

### Mettre le masque



Se laver les mains à l'eau et au savon.



Prendre le masque par les élastiques. Ajuster le masque sur le visage au-dessus du nez et sous le menton.



Une fois le masque ajusté ne plus le toucher avec les mains.

### Retirer le masque



Se laver les mains à l'eau et au savon.



Enlever le masque en le tenant par les élastiques.



Mettre le masque dans un sac fermé pour être lavé.



Se laver les mains à l'eau et au savon.

### Laver et sécher le masque



Ce masque doit être lavé et séché après chaque utilisation.



Lavage à 60°C pendant 30 minutes minimum.



Séchage complet au sèche-linge ou au sèche-cheveux, dans un délai inférieur à 2h après lavage.



Repassage sous un fer bien chaud quelques minutes sur la face extérieure.



Ce masque résiste au minimum à **10 lavages**.

Lorsqu'il n'est plus utilisable (dommage, déformation, usure), le masque doit être mis dans un sac plastique fermé puis jeté dans le **bac à ordures ménagères** (couverture verte).

Masque C-AIR catégorie 2 de protection à visée collective (pour protéger l'ensemble d'un groupe portant un masque), certifié à l'état neuf par la Direction Générale de l'Armement pour sa qualité de filtration et sa respirabilité.

Composition : couche extérieure, 65% coton, 35 % polyester. Couche intérieure, 100% polyester. Matières OEKO TEX. Fabriqué par le groupe français CEPOVETT.

Ce masque nécessite une vigilance pour les enfants afin d'éviter tout risque d'étranglement.

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

## Masque en tissu lavable

### Descriptif du masque

Ce masque, taille unique, est destiné à un usage grand-public et professionnel et est exclusivement réservé à des usages non sanitaires (UNS). Il est destiné à prévenir les projections de gouttelettes. De catégorie 2 "UNS 2" à visée collective, il a vocation à protéger l'ensemble d'un groupe portant ces masques.

Il a été certifié à l'état neuf par la Direction Générale de l'Armement, numéro de rapport : RP/20-2017/DGAMNRBC/2000305/NP. Il est strictement adapté à la crise sanitaire liée au COVID-19.

Ce masque doit être porté en complément des gestes barrières et des mesures de distanciation physique. Il n'est pas destiné à être utilisé par les personnels soignants au contact des patients.

Longueur du masque 20 cm x largeur 10 cm

### Composition et stockage

Ce masque est composé de deux couches de tissus superposées :

- Couche extérieure, 65% coton, 35% polyester 160 gr/m<sup>2</sup> traitement antibactérien.
- Couche intérieure, 100% polyester. Matières OEKO TEX.


À stocker dans un endroit propre, sec et à l'abri de la lumière.

### Performance

Ce masque a été testé selon le protocole d'essais décrit dans le document DGA du 25 mars 2020.

Les performances à l'état neuf sont donc :

- Efficacité de filtration des particules de 3 µm : > 70%.
- Respirabilité : essai de perméabilité à l'air > 96 L.m<sup>2</sup>. S-1 pour une dépression de 100 Pa.

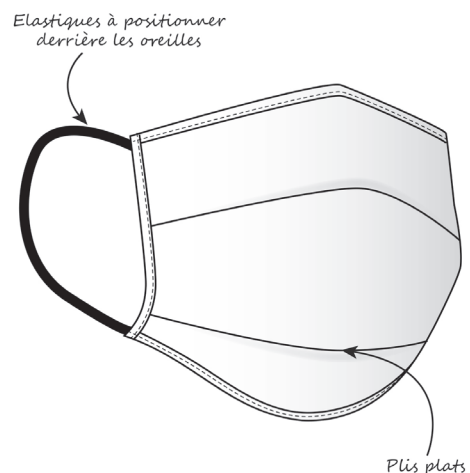

Ce masque a été fabriqué par l'entreprise CEPOVETT 150 ancienne route de Beaujeu à Villefranche sur Saône